

Fagron Genomics

Gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij het correct afnemen en insturen van het DNA-staal voor onderzoek. Daarnaast bevat het instructies voor het invullen van de online vragenlijst op fagrongenomics.com.

Inhoud van uw kit

- 1 x steriele swab
- 2 x schriftelijke toestemming patiënt, voorzien van unieke codes
- 1 x gebruiksaanwijzing
- 1 x sticker voorzien van een unieke code

Belangrijk! Lees deze informatie voordat u begint

- Het juist afnemen van het wangslijmvlies is cruciaal voor de uitkomst van de DNA analyse. Zie onderstaande instructies voor het correct afnemen van het staal of eigen instructies.
- Draag beschermende kleding, handschoenen en een bril bij afname van het staal.
- Houd het wattenstaafje vast bij het handvat tijdens het afnemen van het staal.
- Neem het staal direct af na openen van de plastic folie.
- Zet niet teveel druk en buig het wattenstaafje niet bij het nemen van het staal van uw patiënt, dit kan het staafje doen breken. De swab is voorzien van een breekpunt waarmee de punt van het staafje kan worden afgebroken in een testbuis (in het labo).


Afnemen van het staal



Trek handschoenen aan en haal de swab uit de folie. (zie afbeelding 1)



Om het openen van de swab te vergemakkelijken, houdt u het wattenstaafje met de ene hand bij de plastic buis en drukt u met uw duim op de zijkant van het handvat. (zie afbeelding 2)

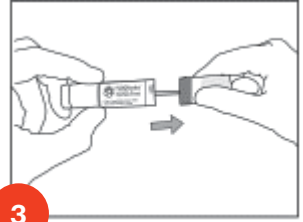

Houd het wattenstaafje vast bij het handvat, verwijder het staafje uit de plastic buis en plaats de buis op een schoon oppervlak. (zie afbeelding 3)

*Ga verder met stap 4 op de volgende pagina.

Fagron Genomics, S.L.U.

C/Josep Tapioles, 150
08226 Terrassa
Barcelona (Spain)

www.fagron.com

 **Fagron**
genomics

Fagron Genomics

Gebruiksaanwijzing



4

Houd het handvat vast, plaats het wattenstaafje op de tong en bevochtig het met speeksel gedurende tien seconden. (zie afbeelding 4)



5

Beweeg het wattenstaafje naar één kant van de mond en masseer het gedurende tien seconden krachtig tussen de wang en het tandvlees. Gebruik de andere hand om lichte druk op de wang uit te oefenen. (zie afbeelding 5)



6

Herhaal stap 5 aan de andere kant van de mond. (zie afbeelding 6)

7

Nadat u het staal hebt genomen, plaatst u het wattenstaafje terug in de plastic buis en sluit deze goed. Identificeer het verzamelde staal met de sticker die is meegeleverd in de verpakking. Stuur het staal zo snel mogelijk naar het laboratorium.

Registreer uw test & patiënt online

- Log in op het Fagron Genomics platform via fagrongenomics.com. Heeft u nog geen account of wenst u aanvullende informatie te ontvangen? Neem dan direct contact op met uw Sales Representative.
- Doorloop de stappen op het Fagron Genomics platform. Indien u aanvullende instructies wenst te ontvangen, neem dan direct contact op met uw Sales Representative. Een gebruikershandleiding is beschikbaar.

Verzend uw stalen inclusief de schriftelijke toestemming

- De arts en de patiënt ondertekenen de schriftelijke toestemming in tweevoud.
- Volg de instructies van uw Sales Representative voor het versturen van het staal inclusief één exemplaar van de schriftelijke toestemming. Stalen zullen niet worden verwerkt zonder schriftelijke toestemming of indien informatie ontbreekt.
- Binnen ongeveer 4 tot 5 weken zal de voorschrijvend arts per mail worden geïnformeerd over de beschikbaarheid van de resultaten.